


CE



Pánevní pás
100Hb Gravid

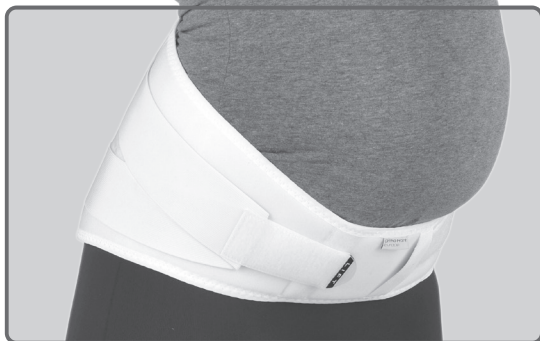

HANDICAP

Pánevní pás 100Hb Gravid

URČENÝ ÚČEL

Pánevní pás 100Hb Gravid je určen ke zpevnění trupu při bolesti zad gravidních pacientek.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Zvyšuje bazální tonus spodní části trupu a zpevňuje bederní oblast.

INDIKACE

Přetížení trupu a bolest zad v těhotenství.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

MATERIÁL

Polyuretan (PUR) 45%, polyester (PES) 30%, polyamid (PAD) 10%, bavlna 10%, Linel 5%.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.




UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřené rány nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

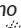

Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .



Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic


POKYNY K NAsAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka




1

Obtočte pánevní pás kolem pánve (přes kyčelní kosti).

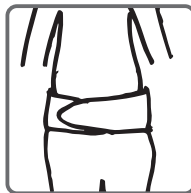


2

Zapněte na boku, pod břichem.

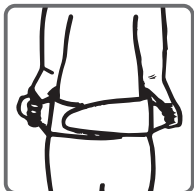

3

Dotáhněte pomocné tahy.

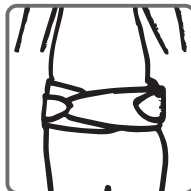

4

Zapněte pomocné tahy.

Před praním zapněte suché zipy.

Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.

Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku můžou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.




HANDICAP, A. S.

NEJVĚŠTÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,
proracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*



Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic

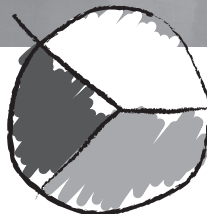

ČESKÝ VÝROBEK