

CE

Bandáž
hlezna
053



HANDICAP

Bandáž hlezna 053

URČENÝ ÚČEL

Hlezenní bandáž 053 je určena k velmi mírné fixaci hlezna při pooperačních a poúrazových stavech či onemocněních v oblasti hlezna.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Zajišťuje velmi mírnou fixaci v hlezenním a subtalárním kloubu stažením křížovým tahem ortézy.

INDIKACE

Doléčení distorzí hlezna s poraněním LFTA a CFL po sejmutí rigidní fixace.
Doléčení zlomenin v oblasti hlezenního kloubu po sejmutí rigidní fixace.
Stavy po operaci nevyžadující rigidní fixaci.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

MATERIÁL

Polyester (PES) 48%, polyamid (PAD) 20%, elastodien 32%

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.




UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřenou ránu nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.



Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .



Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic

POKYNY K NASAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka



1

Vsuňte postiženou nohu do předšitého otvoru. (větším otvorem směrem ke kotníku).



2

Přitáhněte špičku nohy (chodidlo v extenzi), uchopte elastický tah a obtočte jej kolem kotníku.



3

Zapněte v místech vlasu suchého zipu.

Před praním zapněte suché zipy.

Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.

Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku mohou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.



HANDICAP, A. S.

NEJVĚTŠÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,
propracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*



Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic

DOLNÍ KONČETINY



ČESKÝ VÝROBEK