

CE

Peroneální
páska
062



HANDICAP

Název zdravotnického prostředku

Peroneální páska 062

URČENÝ ÚČEL

Peroneální páska 062 je určena k flexibilní fixaci středního postavení chodidla v hlezenním kloubu při oslabení dorsiflexe hlezna.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Zajišťuje polohu hlezna ve středním postavení za pomoci standardní obuvi a tím brání nechtěné plantiflexi hlezna.

INDIKACE

- Léze nervus peroneus veškeré etiologie.
- Onemocnění projevující se poruchou svalové fixace hlezna.
- Stavby po operacích s oslabením aktivní dorsiflexe nohy.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

MATERIÁL

Polyamid (PAD) 35%, polyuretan (PUR) 25%, polyester (PES) 20%, bavlna 15%, elastan 5%.

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.




UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřenou ránu nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.



Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .




Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic

Datum poslední revize: 1.2. 2020


POKYNY K NASAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka

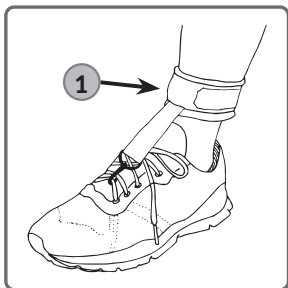

1

Základní díl pásky omotejte kolem lýtku a zajistěte pomocí suchého zipu.

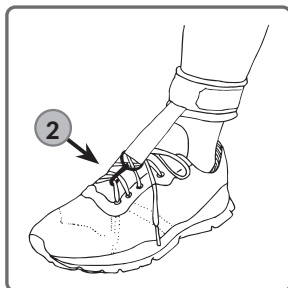

2

Háček na pružence přichyťte ke tkaničce, čímž zajistíte tah.



3

Varianta pásky: krátká a dlouhá

- a) krátká se upíná nad kotníkem
- b) dlouhá se upíná pod kolenem

Před praním zapněte suché zipy.

Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.

Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku mohou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.



HANDICAP, A. S.

NEJVĚŠTÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,
proracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*



Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic

DOLNÍ KONČETINY



ČESKÝ VÝROBEK