

CE



Bederní pás
100E



HANDICAP

Název zdravotnického prostředku

Bederní pás 100E

URČENÝ ÚČEL

Bederní pás 100E je určen k mírnému zpevnění a termoterapii trupu při pooperačních a pouřazových stavech, onemocněních nebo přetížení v oblasti bederní páteře.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Zvyšuje bazální tonus břišní stěny, zpevňuje a prohřívá bederní oblast.

INDIKACE

- Přetížení trupu veškeré etiologie.
- Pooperační a pouřazové stavy vyžadující zpevnění trupu.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

MATERIÁL

Bavlna 84%, polyester (PES) 8%, elastan 8%.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.




UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřené rány nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.



Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .




Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

Datum poslední revize: 1.2. 2020

POKYNY K NAsAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka

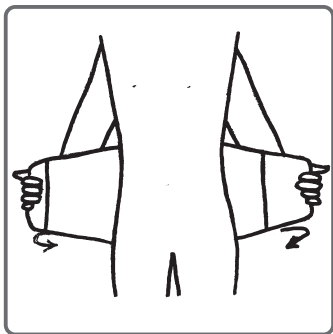

1

Obtočte bederní pás kolem pasu, přidržte na břiše.



2

Dotáhněte a zapínejte od spodního okraje nahoru. Přesvědčte se, zda háčky suchého zipu nepřesahují textilii, aby nepoškodily kůži nebo oblečení.

Před praním zapněte suché zipy.

Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.

Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku můžou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.




HANDICAP, A. S.

NEJVĚŠÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,
proracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*



Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic

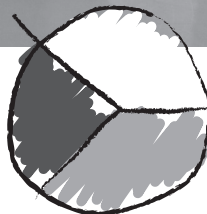

ČESKÝ VÝROBEK