

CE



Pánevní pás
100H



HANDICAP

Pánevní pás 100H

URČENÝ ÚČEL

Pánevní pás 100H je určen ke zpevnění pánevní oblasti při pooperačních a poúrazových stavech nebo přetížení.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Zvyšuje bazální tonus spodní části trupu a zpevňuje pánevní oblast.

INDIKACE

- Přetížení dolní části trupu, pánve a kyčlí veškeré etiologie.
- Diastáze symfýzy (bez pánevní nestability).
- Pooperační a poúrazové stavy vyžadující zpevnění spodní části trupu.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

MATERIÁL

Polyester (PES) 30%, polyamid (PAD) 28%, Linel 23%, polyuretan (PUR) 10%, bavlna 9%.

ČÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.




UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřené rány nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.




Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .




Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic

POKYNY K NASAZENÍ


První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka

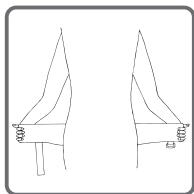

- 1** Obtočte pánevní pás kolem pánve (přes kyčelní kosti).

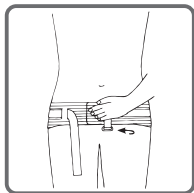

- 2** Přitlačte levou stranu pásu na břicho, přeložte pravou stranu a zapněte výrobek.

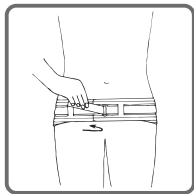

- 3** Dotáhněte pomocný tah. Měli byste cítit příjemný tlak na kyčle.

Před praním zapněte suché zipy.

Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.

Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku mohou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.




HANDICAP, A. S.

NEJVĚŠÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,
proracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*



Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic

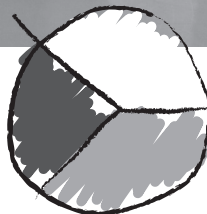

ČESKÝ VÝROBEK